

DAMON ULTIMATM

SYSTEM



O PRIMEIRO VERDADEIRO SISTEMA DE
EXPRESSÃO COMPLETA



A REVOLUÇÃO DAMON ULTIMA™

Para um acabamento mais rápido e mais preciso

Os arcos e brackets autoligados passivos convencionais têm o inconveniente de deixar muita folga. O resultado é um menor controlo, ajustes manuais e um tempo de tratamento prolongado.

Damon Ultima é o primeiro dispositivo ortodôntico a permitir uma expressão completa do torque para um acabamento mais rápido e mais preciso. Inteiramente repensado para reduzir ao máximo a folga, este dispositivo permite um controlo preciso da rotação, da angulação e do torque.



“ O primeiro conjunto arco e bracket capaz finalmente de proporcionar uma verdadeira expressão completa.”

- Dr. Dwight Damon

*Dr. Dwight Damon é um consultor pago pela Ormco. As opiniões expressas são as do Dr. Damon. A Ormco é um fabricante de dispositivos médicos e não dispensa aconselhamento médico. Os clínicos devem usar o seu próprio julgamento profissional no tratamento dos seus pacientes.


SISTEMA INTEGRADO ELIMINA VIRTUALMENTE A FOLGA

Graças ao seu arco rectangular patenteado com os bordos arredondados e sua ranhura em forma de paralelogramo, o sistema Damon Ultima permite um encaixe direto ao nível dos pontos de contato horizontais e verticais.



PSL CONVENCIONAL

Folga excessiva que resulta em menor controlo

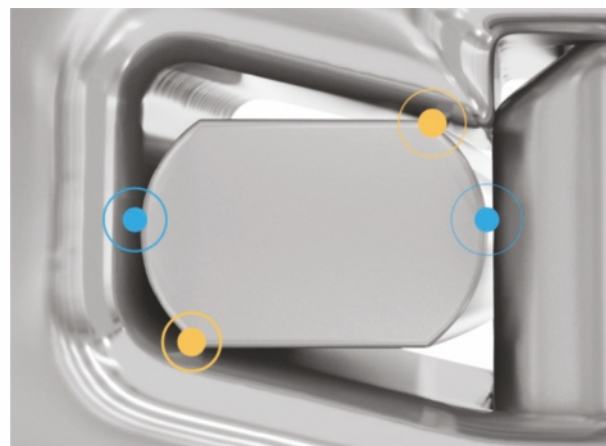

SISTEMA DAMON ULTIMA

Quatro pontos de contato para um controlo preciso da rotação, da angulação e do torque

CONTROLO PRECISO DA ROTAÇÃO, DA ANGULAÇÃO E DO TORQUE

Obtenha um controlo mais rápido graças à rotações obtidas com o primeiro arco Damon Ultima rectangular com bordos arredondados e uma expressão completa com a ajuda do segundo arco Damon Ultima com forças mais leves.

PROGRESSÃO DE ARCOS STANDARD



Round Wires
.014, .018 CuNiTi

DAMON ULTIMA
Round-Sided
Rectangular Wire
.014 x .0275 CuNiTi

DAMON ULTIMA
Round-Sided
Rectangular Wire
.018 x .0275 CuNiTi



ROTAÇÃO

O encaixe do arco Damon Ultima rectangular com bordos arredondados ao nível dos pontos de contato horizontais permite um melhor controlo da rotação.



ANGULAÇÃO


A angulação é assim obtida mais cedo graças aos pontos de contato verticais.



TORQUE

O encaixe ao nível dos pontos de contato verticais permite o controlo e a expressão completa do torque com forças mais leves.

OPÇÕES DE BRACKET RETROINCLINAÇÃO & PROINCLINAÇÃO PARA UM MELHOR CONTROLE DE TORQUE

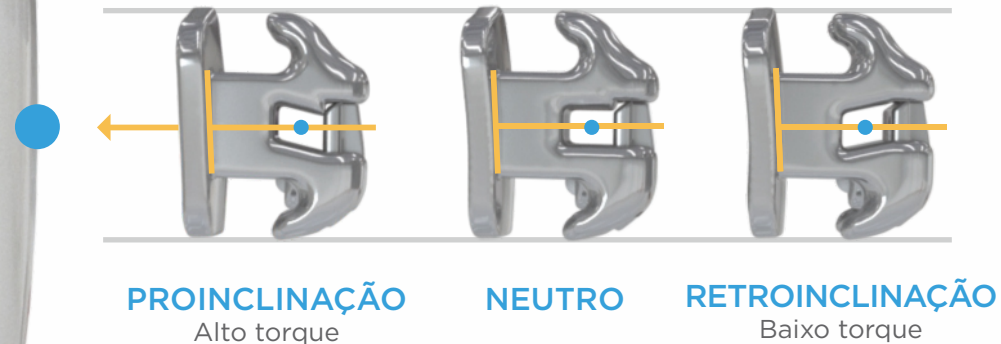

Os brackets são desenhados a partir do ponto central da ranhura para se alinhar com o ponto FA para expressar o torque desejado e fornecer um posicionamento mais fácil e mais preciso.

OPÇÕES DE ARCOS ADICIONAIS

Outros tamanhos disponíveis em:

- .019 X .0275, .020 X .0275, .021 X .0275 and in CuNiTi, TMA e Aço
- .016 X .0275 Aço para correção transversal e nivelamento



DISPOSITIVO MELHORADO: SIMPLES, PRÁTICO E FIÁVEL*



Aleta de ligação totalmente repensada para um encaixe das cadeias otimizado



Desenho de porta fácil de abrir e fechar com baixas forças recíprocas e retorno tátil

Porta de bracket e arco desenhados para reduzir a interferência de fecho da porta



Aletas de ligação mais suaves desenhadas para melhor conforto do paciente e interferência oclusal mínima



Base de bracket com malha de calibre 80 desenhada para força de adesão ótima durante todo o tratamento e uma experiência de remoção previsível



Base de forma romboidal e linha de marcação melhorada permitem um posicionamento ótimo do bracket



Ranhura vertical permite colocação simples dos ganchos removíveis concebidos para uma utilização durável com elásticos e auxiliares Ormco



INFORMAÇÕES DE PEDIDO

MAXILAR	Referência	Descrição
Central Neutro	333-2100	U1L Damon Ultima .022 +7/5/0 Neutro TQ
	333-1100	U1R Damon Ultima .022 +7/5/0 Neutro TQ
Central Retroinclinação	333-2110	U1L Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
	333-1110	U1R Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
Central Proinclinação	333-2120	U1L Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
	333-1120	U1R Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
Lateral Neutro	333-2200	U2L Damon Ultima .022 +3/9/0 Neutro TQ
	333-1200	U2R Damon Ultima .022 +3/9/0 Neutro TQ
Lateral Retroinclinação	333-2210	U2L Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
	333-1210	U2R Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
Lateral Proinclinação	333-2220	U2L Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
	333-1220	U2R Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
Canino Neutro	333-2300	U3L Damon Ultima .022 -2/5/0 Neutro TQ
	333-1300	U3R Damon Ultima .022 -2/5/0 Neutro TQ
Canino Retroinclinação	333-2310	U3L Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
	333-1310	U3R Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
Canino Proinclinação	333-2320	U3L Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
	333-1320	U3R Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
Pré-molar (Universal) Neutro	333-2400	U4&5L Damon Ultima .022 -4/2/0 Neutro TQ
	333-1400	U4&5R Damon Ultima .022 -4/2/0 Neutro TQ

Referência	Descrição
227-1118	Damon Ultima arco TMA 10pk .018x.0275 *
227-1116	Damon Ultima arco TMA 10pk .019x.0275
227-1122	Damon Ultima arco TMA 10pk .020x.0275
227-1123	Damon Ultima arco TMA 10pk .021x.0275
227-1161	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .014 X .0275 *
227-1163	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .018 X .0275 *
227-1164	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .019 X .0275
227-1165	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .020 X .0275
227-1166	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .021 X .0275
227-1267	Damon Ultima arco SST 10pk .016x.0275 *
227-1272	Damon Ultima arco SST 10pk .018x.0275 *
227-1271	Damon Ultima arco SST 10pk .019x.0275
227-1273	Damon Ultima arco SST 10pk .020x.0275
227-1274	Damon Ultima arco SST 10pk .021x.0275

* disponível em breve.

MANDIBULAR	Referência	Descrição
Central Neutro	333-3100	L1L Damon Ultima .022 -1/2/0 Neutro TQ
	333-4100	L1R Damon Ultima .022 -1/2/0 Neutro TQ
Central Retroinclinação	333-3110	L1L Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
	333-4110	L1R Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
Central Proinclinação	333-3120	L1L Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
	333-4120	L1R Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
Lateral Neutro	333-3200	L2L Damon Ultima .022 -1/4/0 Neutro TQ
	333-4200	L2R Damon Ultima .022 -1/4/0 Neutro TQ
Lateral Retroinclinação	333-3210	L2L Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
	333-4210	L2R Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
Lateral Proinclinação	333-3220	L2L Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
	333-4220	L2R Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
Canino Neutro	333-3300	L3L Damon Ultima .022 -3/5/0 Neutro TQ
	333-4300	L3R Damon Ultima .022 -3/5/0 Neutro TQ
Canino Retroinclinação	333-3310	L3L Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
	333-4310	L3R Damon Ultima .022 Retroinclinação TQ
Canino Proinclinação	333-3320	L3L Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
	333-4320	L3R Damon Ultima .022 Proinclinação TQ
1° Pré Neutro	333-3400	L4L Damon Ultima .022 -12/4/0 Neutro TQ
	333-4400	L4R Damon Ultima .022 -12/4/0 Neutro TQ
2° Pré Neutro	333-3500	L5L Damon Ultima .022 -17/4/0 Neutro TQ
	333-4500	L5R Damon Ultima .022 -17/4/0 Neutro TQ

Para mais informações, contate o seu Representante comercial Ormco.

Visite ormco.com/ultima

©2021 Ormco Corporation
PN: 762-6214 v. 1

Ormco™
ORMCO BV
Basicweg 20
3821 Amersfoort
The Netherlands